

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 13 januari 2012 tot toelating van het middel Incidin Foam, toelatingnummer 13537 N

A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (incl. mycobacteriën, doch excl. bacteriesporen) en gisten op oppervlakken in ziekenhuizen en overige instellingen van de gezondheidszorg, met uitzondering van keukens.

De dosering en inwerktijd zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.
GEBRUIKSAANWIJZING

Sterk verontreinigde oppervlakken vooraf grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel en vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Licht verontreinigde oppervlakken kunnen met dit gecombineerde reinigings- en desinfectiemiddel in één gang worden behandeld.

Gebruiksklare schuimoplossing.

Incidin Foam onverdund op een afstand van ca. 30 cm op het oppervlak sproeien en laten inwerken. Oppervlakken volledig bevochtigen en zoveel schuim gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven.

Aansluitend met een schone doek het product verdelen en aan de lucht laten drogen.

Of Incidin Foam onverdund op wegwerpdoek sproeien en het oppervlak daarmee afnemen. Oppervlakken volledig bevochtigen en zoveel schuim gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven. Daarna het product aan de lucht laten drogen.

Niet naspoelen of nadrogen.

Voor gebruik in ziekenhuizen en overige instellingen van de gezondheidszorg wordt het middel uitsluitend aanbevolen voor de volgende toepassingen:

Toepassingsgebieden	Gebruiksverdunding	Minimale inwerktijd
Oppervlakken (vloeren, wanden, meubilair) m.u.v. TBC-afdelingen	onverdund product	5 min.
Oppervlakken in TBC-afdelingen	onverdund product	5 min.

N.B.:

- Gebruik het middel niet op materiaal dat silicone bevat.