
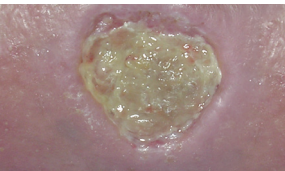



Kleur van de wond	Hoeveelheid wondvocht	Primaire verbandkeuze/Oppervlakkige wond. Zorg dat het wondproduct contact maakt met de wondbodem!	Diepe wond (= wond dieper dan 1,5 cm)
 <p><b>ROOD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- beschermen</li> <li>- vochtig wondmilieu</li> <li>- bacterieel evenwicht</li> <li>- stimuleren wondgenezing</li> </ul>	<p>Infectie?</p> <p>Nee → Is de wond nat, vochtig of droog?</p> <p>Ja → Is de wond nat, vochtig of droog?</p>	Nat → Kliniderm fiber cmc Afdекken met Kliniderm foam of Kliniderm superabsorbent dressing	Opvullen met Kliniderm fiber cmc (cavity) Afdекken met Kliniderm foam of Kliniderm superabsorbent dressing
		Vochtig → Kliniderm fiber cmc Afdекken met Kliniderm foam (silicone) of Klinipress exsupad of Klinipress novopad	Opvullen met Kliniderm fiber cmc (cavity) Afdекken met Kliniderm foam (silicone) of Klinipress exsupad
		Droog → Kliniderm silicone wound contact layer Afdекken met Klinipress non woven compress	Opvullen met Kliniderm hydrogel of Mesitran soft/zalf Afdекken met Kliniderm foam (silicone) lite of Klinipress non woven compress
 <p><b>GEEL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reinigen</li> <li>- bacteriën bestrijden</li> <li>- vochtig wondmilieu</li> <li>- stimuleren wondgenezing</li> </ul>	<p>Infectie?</p> <p>Ja → Is de wond nat, vochtig of droog?</p> <p>Nee → Is de wond nat, vochtig of droog?</p>	Nat → Mesitran soft/zalf of Kliniderm alginate Afdекken met Kliniderm foam of Kliniderm superabsorbent dressing	Opvullen met Mesitran soft/zalf op Klinipress non woven compress of op een Kliniderm alginate (cavity) Afdекken met Kliniderm foam of Kliniderm superabsorbent dressing
		Vochtig → Mesitran soft/zalf Afdекken met Kliniderm foam (silicone)	Opvullen met Mesitran soft/zalf op Klinipress non woven compress of op een Kliniderm alginate (cavity) Afdекken met Kliniderm foam (silicone) of Klinipress exsupad
		Droog → Mesitran soft/zalf of Mesitran tulle Afdекken met Kliniderm foam (silicone) lite of Klinipress non woven compress of Klinipress novopad	Opvullen met Mesitran soft/zalf op Klinipress non woven compress of op een Kliniderm alginate (cavity) Afdекken met Kliniderm foam (silicone) lite of Klinipress non woven compress of Klinipress exsupad
 <p><b>ZWART</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reinigen</li> <li>- necrose bestrijden</li> <li>- bacteriën bestrijden</li> </ul>	<p>Infectie?</p> <p>Ja → Is de wond nat, vochtig of droog?</p> <p>Nee → Is de wond nat, vochtig of droog?</p>	Nat → Kliniderm alginate Afdекken met Kliniderm foam of Klinipress exsupad of Kliniderm superabsorbent dressing	Opvullen met Kliniderm alginate (cavity) Afdекken met Kliniderm foam of Klinipress exsupad of Kliniderm superabsorbent dressing
		Vochtig → Kliniderm foam (silicone) of Kliniderm alginate Afdекken met Klinipress exsupad	Opvullen met Kliniderm alginate (cavity) Afdекken met Kliniderm foam (silicone) of Klinipress exsupad
		Droog → Kliniderm hydrogel of Kliniderm silicone wound contact layer Afdекken met Klinipress non woven compress	Wondbodem bedekken met Kliniderm hydrogel of Mesitran soft/zalf, opvullen met Klinipress non woven compress Afdекken met Klinipress novopad
		Nat → Necrotectomie door behandelaar*, Mesitran zalf of Kliniderm alginate Afdекken met Kliniderm foam of Kliniderm superabsorbent dressing	Necrotectomie door behandelaar*, opvullen met Mesitran soft/zalf op Klinipress non woven compress of op een Kliniderm alginate (cavity) Afdекken met Kliniderm foam of Kliniderm superabsorbent dressing
		Droog → Necrotectomie door behandelaar*, daarna Mesitran soft/zalf/tulle Afdекken met Kliniderm silicone wound contact layer en/of Klinipress non woven compress	Necrotectomie door behandelaar*, opvullen met Mesitran soft/zalf op Klinipress non woven compress of op een Kliniderm alginate (cavity) Afdекken met Kliniderm foam (silicone) of Klinipress novopad
		Nat/Vochtig → Necrotectomie door behandelaar*, Kliniderm alginate Afdекken met Kliniderm foam of Klinipress exsupad of Kliniderm superabsorbent dressing	Necrotectomie door behandelaar*, opvullen met Mesitran soft/zalf op Klinipress non woven compress of op een Kliniderm alginate (cavity) Afdекken met Kliniderm foam of Klinipress exsupad of Kliniderm superabsorbent dressing
		Droog → Kliniderm silicone wound contact layer en/of Klinipress non woven compress	

\* Na necrotectomie opnieuw de wond beoordelen.

PRODUCTKEUZE	EIGENSCHAPPEN	AANDACHTSPUNTEN
Kliniderm foam (silicone)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Groot absorptievermogen</li> <li>Verticale vochtopname</li> <li>Silicone fixatielaag is huidvriendelijk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bij zeer natte wonden te weinig absorptievermogen</li> <li>Mag niet i.c.m. een Hypochloriet (eusol) gebruikt worden</li> <li>Altijd ongeveer 2 cm over de wondranden aanbrengen</li> <li>Maximaal 7 dagen laten zitten</li> </ul>
Kliniderm alginate	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neemt veel vocht op</li> <li>Vormt een gel i.c.m. wondvocht</li> <li>Makkelijk te verwijderen</li> <li>Geur- en pijn reducerend</li> <li>Ondersteunt autolitisch debridement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moet <b>binnen</b> de wondranden worden aangebracht</li> <li>Kan 3 tot 6 dagen blijven zitten</li> </ul>
Mesitran (honingpreparaat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antibacterieel</li> <li>Schimmeldodend</li> <li>Ontstekingsremmend</li> <li>Ondersteunt autolitisch debridement</li> <li>Stimuleert de wondgenezing</li> <li>Kan meerdere dagen op de wond blijven afhankelijk van wondvochtproductie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mesitran hydro en border geschikt voor vochtige wonden</li> <li>Mesitran net voor natte wonden</li> <li>Mesitran soft kan bij alle typen</li> <li>Mesitran zalf goed toe te passen als necroseoplosser</li> <li>Mesitran tulle voor droge/matig vochtige wonden</li> <li>Niet i.c.m. AG/zilver</li> </ul>
Kliniderm hydrogel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geeft vocht aan de wond</li> <li>Werkt verkoelend</li> <li>Ondersteunt autolitisch debridement</li> <li>Kan meerdere dagen op de wond blijven afhankelijk van wondvochtproductie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afdekken met een secundair verband</li> </ul>
Kliniderm film (folieverband)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Douchen mogelijk</li> <li>Kan vocht doorlaten (semipermeabel)</li> <li>Wondinspectie kan zonder wissel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voornameeljk als secundair verband</li> <li>Heeft minimaal 5 cm gezonde huid nodig om te plakken</li> <li>Bij gevoelige en oudere huid Kliniderm film xtrata gebruiken</li> </ul>
Kliniderm fiber cmc	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neemt veel vocht op</li> <li>Verticale vochtopname</li> <li>Kan meerdere dagen op de wond blijven afhankelijk van wondvochtproductie</li> <li>Vormt een gel</li> <li>Ter bescherming van rood weefsel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afdekken met een secundair verband</li> <li>Moet over de wondranden worden aangebracht</li> </ul>
Klinitulle (vetgaas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kleinmazig en vet</li> <li>Minimaal dagelijks verwisselen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nooit</b> dubbelvouwen, enkele laag aanbrengen</li> <li>Gebruiken met een secundair verband</li> </ul>
Kliniderm silicone wound contact layer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gemaakt van siliconen</li> <li>Skin tear volgens protocol voor behandeling</li> <li>Ter bescherming van rood weefsel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afdekken met een secundair verband</li> <li>Voor eenmalig gebruik</li> <li>Mag tot 7 dagen blijven zitten</li> <li>Let op: verband heeft 2 schutvellen die beide verwijderd dienen te worden</li> </ul>
Klinipress exsupad (absorberend verband)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neemt veel vocht op</li> <li>Heeft een hydrofobe achterzijde</li> <li>Wattenvulling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Witte zijde op de wond</li> <li>Dagelijkse verbandwissel</li> </ul>
Kliniderm superabsorbent dressing (absorberend verband)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neemt extreem veel vocht op</li> <li>Superabsorberende korrels nemen wondvocht op en houden het vast</li> <li>Kan 30x eigen gewicht vasthouden</li> <li>Toplaag blijft droog waardoor zo min mogelijk kans op maceratie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fixeren met een windsel</li> </ul>