

**BIJLAGE I** bij het besluit d.d. 22 maart 2013 tot toelating van het middel Suma Alcoholdoekjes, toelatingnummer 14025 N

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en virussen:

- a. op oppervlakken welke in contact komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor;
- b. op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
- c. op oppervlakken en instrumenten in de gezondheidszorg;
- d. op oppervlakken in de cosmetische en farmaceutische industrie.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

Het middel bestaat uit gebruiksklare vochtige doekjes geïmpregneerd met een desinfecterende oplossing.

Toepassing:

Oppervlakken of instrumenten eerst goed reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.

Daarna het te desinfecteren oppervlak met een Suma Alcoholdoekje afnemen. Zorg ervoor dat het gehele te desinfecteren oppervlak gedurende de inwerktijd volledig bevochtigd blijft.

Alleen vochtige doekjes zijn werkzaam, doekjes na uitdroging niet gebruiken.

Dosering: 1 doekje bevat 1 ml desinfectie vloeistof en is geschikt voor maximaal 0,125 m<sup>2</sup> oppervlak. Zoveel Suma Alcoholdoekjes gebruiken dat de behandelde oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven.

Minimale inwerktijd: 1 minuut.