

## HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

18 december 2015

Actueel WGA van het middel Incidin OxyFoam, 15021 N

### A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik:

ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), gisten, en schimmels op:

- harde oppervlakken in ruimten en transportmiddelen bestemd voor mensen;
- harde oppervlakken in ruimten bestemd voor humane gezondheidszorg en in dierenartsenpraktijken;
- harde oppervlakken welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor;
- harde oppervlakken in laboratoria.

ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen), mycobacteriën, gisten, en schimmels op:

- harde oppervlakken in TBC afdelingen

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

### B. GEBRUIKSAANWIJZING

Het middel is een gebruiksklaar product. Het middel kan gebruikt worden voor de desinfectie van harde oppervlakken in ruimten en transportmiddelen, inclusief externe harde oppervlakken van hulpmiddelen, apparatuur en machines (geen CIP).

Het te desinfecteren oppervlak besproeien zodanig dat het oppervlak volledig bevochtigd wordt. Gebruik voldoende vloeistof om het oppervlak gedurende de gehele inwerktijd nat te houden (ongeveer 20 ml/m<sup>2</sup>). Na afloop van de inwerktijd het behandelde oppervlak laten opdrogen of droogwrijven met een (microvezel of papieren) doek.

Minimale inwerktijd:

- Voor bacteriën (exclusief mycobacterien en bacteriesporen), gisten en schimmels:  
5 minuten
- Voor mycobacteriën (alleen op TBC-afdelingen): 15 minuten

De gebruikte doek kan gewassen of met het huishoudelijk afval verwijderd worden.

Het middel niet gebruiken op oxidatiegevoelige materialen zoals b.v. natuursteen, koper, brons, messing, nikkel en aluminium.