

VOOR EEN DOELTREFFENDE OPPERVLAKKENDESINFECTIE

Incidin® OxyFoam


Gebruiksklare reiniger en desinfectans met Hi-speed H₂O₂[™]

De innovatieve formule van Incidin OxyFoam is op basis van een gepatenteerde* waterstofperoxide-oplossing met een breed werkingsspectrum.

Werkzaam tegen een breed scala van bacteriën en virussen. Laat geen actieve residuen achter doordat het actieve ingrediënt uiteenvalt in water en zuurstof.

Incidin OxyFoam - kenmerken :

- ▲ Gebaseerd op Hi-speed H₂O₂[™]
- ▲ Voldoet aan EN16615 norm
- ▲ Dual label :
 - CE markering, klasse IIb
 - Biocide toelating, 15021 N
- ▲ Actief ingrediënt valt uiteen in water en zuurstof
- ▲ Uitstekende materiaalcompatibiliteit

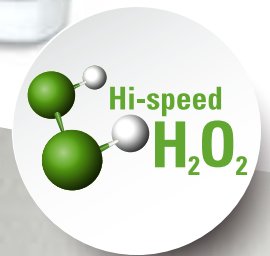

Incidin® OxyFoam

Gebruiksklare reiniger en desinfectans met Hi-speed H₂O₂TM



Bactericide
(EN 13727 / 16615)



Virucide werking tegen
omkapselde virussen



**Noro
virucide**


Kenmerken	Voordelen
EFFECTIEF	Breed werkingsspectrum Korte inwerktijden
VEILIG	Actief bestanddeel breekt af in water en zuurstof Uitstekende materiaalcompatibiliteit
GEMAKKELIJK	Reiniging & desinfectie in één stap Gebruiksklaar

MICROBIOLOGISCHE TESTRESULTATEN

WERKZAAMHEID ONVERDUND	OxyFoam INWERKTUJD (Medical Device)
Oppervlakken desinfectie volgens VAH methode 2015 (incl. EN 16615), vuile condities	
Bactericide, gistdodend	5 min
Fungicide	15 min
Mycobactericide	15 min
Getest volgens RKI aanbeveling 01/2004* (vuile condities)	
Actief tegen omkapselde virussen volgens RKI aanbeveling 01/2004*	15 sec
Adeno*	1 min
Polyoma SV40*	30 sec
Rota*	30 sec
Europese normen (schone en vuile condities)	
EN 13727 (bactericide)	15 sec
EN 13624 (gistdodend)	1 min
EN 13624 (fungicide)	5 min
EN 14348 (tuberculocide, mycobactericide)	5 min
EN 14476 Adeno	30 sec
EN 14476 Noro	15 min
Europese normen (vuile condities) - 4 vlakken-test	
EN 16615 (bactericide)	15 sec
EN 16615 (gistdodend)	15 sec
EN 16615 (fungicide)	5 min
EN 16615 (tuberculocide, mycobactericide)	15 min
Biocide-inwerktijd volgens Ctg-toelating	
Bactericide (excl. mycobacteriën en sporen)	5 min
Gistdodend	5 min
Fungicide	5 min

* DVV 2008

INCIDIN OXYFOAM GEBRUIKSAANWIJZING

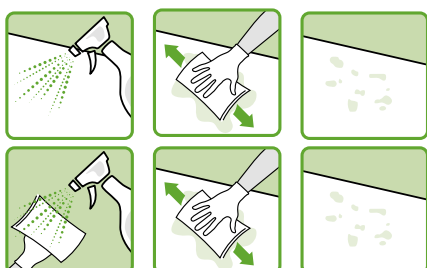

- Het product op een afstand van ca. 30 cm op het oppervlak sprayen
 - Reinig het oppervlak en zorg voor volledige bevochtiging van het oppervlak
 - Laat drogen
- Het product aanbrengen op een schone doek (wipe)
 - Reinig het oppervlak en zorg voor volledige bevochtiging van het oppervlak
 - Laat drogen

EUROPEAN HEADQUARTERS
ECOLAB EUROPE GMBH
Richtstrasse 7, 8304 Wallisellen, Switzerland
tel : +41(0)44 877 2001

MICROTEK MEDICAL B.V.
A DIVISION OF ECOLAB
Hekkehorst 24, 7207 BN Zutphen, Nederland
tel : +31 575 599 200



Biocide 15021 N

EFFECTIEF. VEILIG. GEMAKKELIJK.

TOEPASSINGSGBIED

Reiniging en desinfectie
foamspray voor medische
oppervlakken (inclusief bv.
sondes) en inventaris.



GEBRUIKSAANWIJZING

Het product op ca. 30 cm
afstand op het oppervlak
sprayen of aanbrengen op een schone doek
(wipe).

Reinig het oppervlak en zorg voor volledige
bevochtiging van het oppervlak vanwege de
contacttijd.

Of gebruik het product onverdund op een
schone doek, reinig het oppervlak en laat
drogen.

Niet geschikt voor einddesinfectie van invasieve
medische hulpmiddelen.

Niet geschikt voor oppervlakken welke gevoelig
zijn voor oxidatieve middelen zoals marmar,
 koper of messing.

SAMENSTELLING

100 g bevat:

1.5g waterstofperoxyde

VERPAKKING EN BESTEL- INFORMATIE

PRODUCT	VERPAKKING	REF
Incidin OxyFoam	6 x 750ml	3089600
Incidin OxyFoam	2 x 5 L	3089640

BEWAREN - OPSLAG

Het product moet worden bewaard in de
originele verpakking beneden 25°C, op een
koele, droge plaats buiten direct zonlicht.

Houdbaarheidsdatum na opening : tot eind vervaldatum

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

References :

1. Incidin OxyFoam (EN13727 / EN 16615 / EN 14476)