



**BurnJel**

**Wanneer gebruiken**

Klinion BurnJel is gel op waterbasis die direct na de verbranding op de brandwond wordt aangebracht met behulp van een pompflacon. De gel absorbeert de hitte en werkt pijnverzachtend en verkoelend, ook bij verbranding door de zon. BurnJel voorkomt onderkoeling, koelt de brandwond snel en is gemakkelijk mee te nemen.

**Productinformatie BurnJel**

- in handige pompflacon
- gel op basis van gedemineraliseerd water en Tea Tree olie
- Tea Tree olie beperkt de kans op infecties tijdens het koelen
- inhoud flacon is voldoende voor meerdere behandelingen
- hoeft niet gekoeld bewaard te worden

**Gebruik BurnJel**

- BurnJel gebruiken voor oppervlakkige brandwonden
- pomp gel uit flacon tot gehele brandwond bedekt is met BurnJel
- koel 10 tot 30 minuten, stop met koelen zodra de pijn verdwenen is
- de behandeling herhalen wanneer de brandwond nog pijn geeft

**Meer weten?**

Wilt u meer weten over het gebruik van Klinion producten of een deskundig advies? Bel dan met de gratis consumenteninformatielijn van Medeco: 0800 - 022 82 82 (op werkdagen bereikbaar van 9.00 - 16.00 uur).



**Vervolgbehandeling van brandwonden (na het koelen)**




**Let op: raadpleeg een arts in situaties zoals beschreven in Eerste hulp bij brandwonden**

Graad	Behandeling	Doel
1 <sup>ste</sup> graads	BurnJel (dun) tot pijn verdwenen is	- huid koel en soepel houden
2 <sup>de</sup> graads (oppervlakkig)	antibacteriële zalf (Mesitran) + zalfkompres (Klinitulle) + non woven kompres (NW Compres)  fixeren met een elastisch fixatiewindsel: - Klinifix Cohesive, windingen Kleven op elkaar  blaren <b>niet</b> openen, dit beperkt de kans op infectie  dagelijkse verbandwisseling	- bescherming tegen infectie - snelle wondgenezing - beschermen van aanwezige blaren
2 <sup>de</sup> graads (diep)	antibacteriële zalf (Mesitran) + zalfkompres (Klinitulle) + non woven kompres (NW Compres)  fixeren met een elastisch fixatiewindsel: - Klinifix Cohesive, windingen Kleven op elkaar  dagelijkse verbandwisseling	- bescherming tegen infectie - uitdroging voorkomen - snelle wondgenezing
3 <sup>de</sup> graads	laten behandelen in het ziekenhuis	- specialistische behandeling

**Brandwondenwijzer**

Eerste hulp bij brandwonden

*Neem gratis mee!*

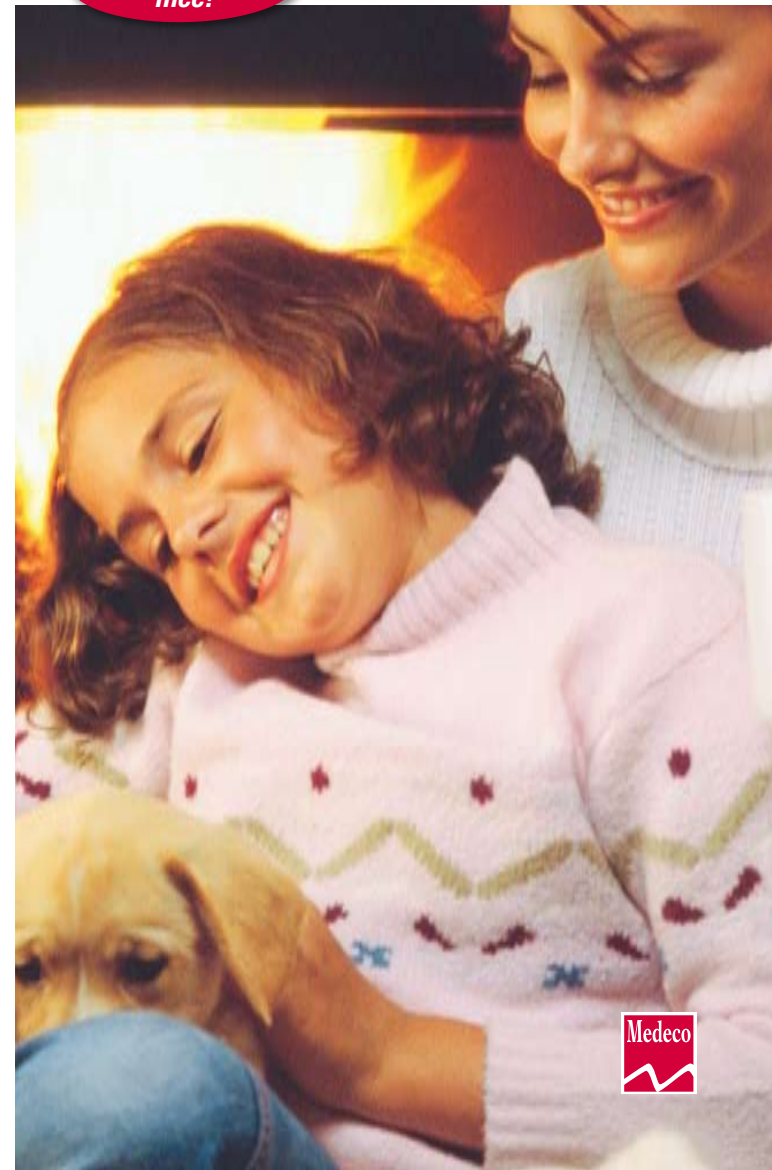

FW18046-01 | Druk- en zeftrouwen voorbehouden. Medeco behoudt zich, te allen tijde, het recht voor haar producten en assortiment te wijzigen.



Medeco B.V., Postbus 1555, 3260 BB Oud-Beijerland  
Telefoon (0186) 63 44 00, Fax (0186) 61 68 93  
info@medeco.nl, www.medeco.nl





## Brandwondenwijzer

Eerste hulp bij brandwonden

Klinion staat voor een compleet assortiment verbandmiddelen voor zowel professioneel gebruik als voor de thuissituatie, op het sportveld, tijdens de vakantie of onderweg.

In deze folder geven we u een aantal richtlijnen voor het verlenen van eerste hulp bij brandwonden. U kunt ook zien welk product u in welke situatie nodig hebt. Lees voor gebruik altijd eerst de bijsluiter.

### Eerste hulp bij brandwonden

- begin direct met het koelen van de brandwond. Dit kan met WaterJel (koelkompres), BurnJel (koelende gel) of met lauw, langzaam stromend water.
- koel de brandwond 10 tot 30 minuten. Stop met koelen zodra de pijn verdwenen is.
- let bij gebruik van water op onderkoeling
- verwijder sieraden en kleding, tenzij ze aan de huid gekleefd zitten. Bij kinderen luiers afdoen, wanneer dit gebied betrokken is bij de verbranding.
- **raadpleeg arts:**
  - als verbranding is ontstaan door elektriciteit of chemisch product
  - bij een 2<sup>de</sup> graads verbranding die groter is dan het oppervlak van de gestrekte hand van het slachtoffer
  - bij een 2<sup>de</sup> graads brandwond aan gewrichten
  - bij elke 3<sup>de</sup> graads verbranding
  - als de brandwond aan het gezicht/hoofd, voeten, handen, hals, borst of onderbuik zit
  - bij elke verbranding rondom ledematen

Zo herkent u de dieptegraad van de brandwond

Graad	Kleur van de huid	Pijn	Overige kenmerken
1 <sup>ste</sup> graads (bijv. verbranding door de zon)	rood	ja	droog
2 <sup>de</sup> graads (oppervlakkig)	rood	ja	blaarvorming
2 <sup>de</sup> graads (diep)	dof rood met witte zones	ja	blaarvorming, zwelling
3 <sup>de</sup> graads	wit/geel/bruin/zwart	nee*	gevoelloos, leerachtig

\* maar omgeving van de brandwond wel



KLINION®



Eerst Klinion WaterJel of BurnJel  
De rest komt later wel!



WATERJEL®

### WaterJel

#### Wanneer gebruiken

In geval van een brandwond moet de huid 10 tot 30 minuten gekoeld worden om beschadiging van diepere huidlagen te voorkomen. Klinion WaterJel is een kompres met gel dat direct na de verbranding op de brandwond wordt gelegd. Het kompres absorbeert de hitte en werkt langdurig pijnverzachend en verkoelend, ook bij verbranding door de zon. Te gebruiken bij kleine tot middelgrote brandwonden. WaterJel voorkomt onderkoeling, koelt de brandwond snel en is gemakkelijk mee te nemen.



#### Productinformatie WaterJel

- met gel geïmpregneerd kompres (5 x 15 cm)
- gel op basis van gedemineraliseerd water en Tea Tree olie
- Tea Tree olie beperkt de kans op infecties tijdens het koelen
- hoeft niet gekoeld bewaard te worden
- kompres kleeft niet aan de wond

#### Gebruik WaterJel

- WaterJel uit de verpakking halen
- leg het kompres op de brandwond
- giet de overgebleven gel uit de verpakking over het kompres
- koel 10 tot 30 minuten. Stop met koelen zodra de pijn verdwenen is
- WaterJel kompres is eenmalig te gebruiken

