

Smith & Nephew

Smith & Nephew REMOVE - kleeflaag remover

Toepassing

REMOVE is ontwikkeld voor het oplossen van kleeflagen en helpen verwijderen van lijmresten (acryl, rubber, hydrocolloid of anders) van de huid.

Productinformatie


- Prettig voor de patiënt
- Voorzichtige en pijnloze verwijdering van hydrocolloïden en acryl- en rubberhoudende lijm(-resten), zonder irritatie of beschadiging van de huid
- Helpt de huid intact te houden tijdens het verwijderen van zelfklevende verbanden
- Bevat Aloë en is vochtinbrengend en conditionerend voor de gevoelige huid
- Niet irriterend en hypo-allergeen, zelfs bij gebruik rond een stoma of bij oudere patiënten
- De veiligheid is bewezen in laboratoriumtesten en klinische studies

Gebruiksaanwijzing:

Stap 1: Houd het geïmpregneerde doekje tegen de rand van de tape of verband

Stap 2: Knijp voorzichtig in het doekje zodat de vloeistof tussen de huid en de kleeflaag komt

Stap 3: Reinig de huid met water en dep droog

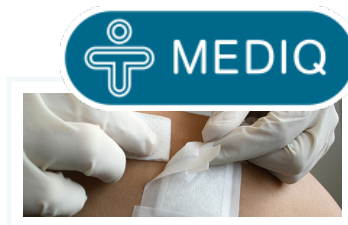

Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving | Binnendoos | Overdoos | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|--|------------|-------------|-----------|---------|
| 3033898 | SMITH & NEPHEW REMOVE TISSUES 59403125 REF 59403125 | 50 st. | 20 x 50 st. | 13773038 | |