

Smith & Nephew REMOVE - kleeplaag remover

Toepassing

REMOVE is ontwikkeld voor het oplossen van kleeclagen en helpen verwijderen van lijmresten (acryl, rubber, hydrocolloid of anders) van de huid.

Productinformatie

- Prettig voor de patiënt
- Voorzichtige en pijnloze verwijdering van hydrocolloïden en acryl- en rubberhoudende lijm(-resten), zonder irritatie of beschadiging van de huid
- Helpt de huid intact te houden tijdens het verwijderen van zelfklevende verbanden
- Bevat Aloë en is vochtinbrengend en conditionerend voor de gevoelige huid
- Niet irriterend en hypo-allergeen, zelfs bij gebruik rond een stoma of bij oudere patiënten
- De veiligheid is bewezen in laboratoriumtesten en klinische studies

Gebruiksaanwijzing:

Stap 1: Houd het geïmpregneerde doekje tegen de rand van de tape of verband

Stap 2: Knijp voorzichtig in het doekje zodat de vloeistof tussen de huid en de kleeplaag komt

Stap 3: Reinig de huid met water en dep droog



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3033898	SMITH & NEPHEW REMOVE TISSUES 59403125 REF 59403125	50 st.	20 x 50 st.	13773038	