

VERIFORTE MED WONDGEL 50GR 301050

Toepassing

Gebruiksklare wondgel; voor decontaminatie (ontsmetten) en/of bevochtigen van een wond. Bevat: water, colloïdaal silicaat, NaCl, NaOCl en HOCl. Verpakt in met één-hand-te-bedienen pompflacon. Afdekken.



Productinformatie

Reinig wond en wondomgeving met spoelvroestof. Dep wond droog. Breng gel aan in de wond. Dek af met secundair wondverband. Mag herhaaldelijk gebruikt worden. Niet onder druk in wond aanbrengen. Na opening 90 dagen houdbaar.

Veriforte Med, wondgel; voor het bevorderen van decontaminatie (ontsmetten) en/of bevochtigen van een wond.

De wondgel is klaar voor gebruik en is verpakt in een pompflacon. De wondgel bevordert zowel een vochtige wondomgeving, alsook de ontsmetting van de wond, waardoor de geur van de wond wordt verminderd. De wondgel kan met één hand worden aangebracht met behulp van de met één-hand-te-bedienen pompflacon. Afdekken met een secundair wondverband.

Samenstelling:

water
NaCl (natriumchloride)
NaOCl (natriumhypochloriet)
HOCl (waterstofhypochloriet)
colloïdaal silicaat (gelvorming)
Specificaties:

wondgel
gebruiksklaar
pompflacon (met één hand te bedienen)
Toepassen voor:

acute wonden
chronische wonden
complexe wonden
operatieve wonden
snijwonden
eerste of tweede graads brandwonden
in lichaamsholten
op blootliggende kraakbeen, pezen, gewrichten en botten

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
-----------	--------------	------------	----------	-----------	---------