

ACCU-CHEK INSIGHT FLEX CANULE

Toepassing

Infuuscanule voor het onderhuids toedienen van insuline met de Accu-Chek Insight insulinepomp. Infuuscanule bestaat uit teflon canule 6mm, 8mm of 10mm, naaldhouder en fixatiepleister. Onderdeel Accu-Chek Insight Flex infuusset. Steriel.



Productinformatie

Accu-Chek Insight Flex, infuuscanule met naaldhouder en fixatiepleister; bestemd voor het onderhuids toedienen van insuline met de Accu-Chek Insight insulinepomp.

De infuuscanule bestaat uit een naaldhouder, een teflon canule en een zelfklevend pleister. In de naaldhouder zit de inbrengnaald met de teflon canule. Wanneer men op de knop van de naaldhouder drukt klapt de inbrengnaald en de canule naar buiten. Na het inbrengen van de canule wordt de naaldhouder van de huid verwijderd en klapt de inbrengnaald automatisch terug in de naaldhouder. Prikaccidenten worden hiermee voorkomen.

De teflon canule dient loodrecht ingebracht te worden. De insulinepomp kan voor een korte tijd afgekoppeld worden, bijvoorbeeld bij sporten of douchen. Het afkoppelen gebeurt direct aan het canulegedeelte. De infuusset wordt op de huid bevestigd met een pleister voorzien van een huidvriendelijke kleeflaag.

De infuuscanule kan handmatig of met behulp van de Accu-Chek LinkAssist Plus inbrenghulp ingebracht worden. De infuusset is latexvrij en steriel verpakt.

Specificatie:

infuuscanule met naaldhouder
teflon canule
lengte canule 6mm, 8mm of 10mm
pleister met huidvriendelijke kleeflaag

Toepassen voor:

onderhuids toedienen van insuline via de Accu-Chek Insight insulinepomp

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3037838	ACCU-CHEK INSIGHT FLEX CANULE 6MM	10 st.	16 x 10 st.	16086902	
3037839	ACCU-CHEK INSIGHT FLEX CANULE 8MM 06541810001 STERIEL	10 st.	16 x 10 st.	16086910	
3037837	ACCU-CHEK INSIGHT FLEX CANULE 10MM STERIEL 06541798001	10 st.	16 x 10 st.	16086929	