

CONTOUR TESTSTRIPS 50ST

Toepassing

Zelfcoderende teststrip voor meten bloedglucosegehalte. Gebruiken met de Contour bloedglucosemeter.

Productinformatie

- Teststrips geschikt voor de Bayer Contour en de Bayer Contour USB glucosemeter (niet geschikt voor de Bayer Contour XT of de Contour USB Next)
- Benodigde hoeveelheid bloed 0.6µl. Testduur 5 sec. Geen interferentie maltose, galactose, hematocriet, paracetamol, enz.
- De glucoseteststrip heeft 0.6µl bloed nodig om de meting uit te kunnen voeren. De bloeddruppel en/of de controlevloeistof wordt door de teststrip opgezogen. De testduur bedraagt 5 seconden. De teststrip dient samen met de Contour bloedglucosemeter gebruikt te worden. Coderen voorafgaand aan een test is niet nodig: de strip doet dit zelf, automatisch.
- De teststrips dienen bewaard te worden bij een temperatuur tussen +2°C en +32°C, niet invriezen. De teststrips gebruiken bij een temperatuur tussen +5°C en +45°C en bij een relatieve luchtvochtigheid tussen 10% en 90%. Bewaar de teststrips daarom nooit in bijvoorbeeld de badkamer of in de keuken. De teststrips in de originele flacon bewaren en na het openen van de flacon deze onmiddellijk sluiten, zodat de strips droog blijven. De teststrips zijn houdbaar tot de datum aangegeven op de verpakking. Gooi de teststrips weg wanneer ze vervallen zijn.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3034245	BAYER CONTOUR TESTSTRIPS 7083 15431045	50 st.	24 x 50 st.	15431045	CONTT