

## MINIMED QUICK-SERTER MMT-305QS

### Toepassing

Inbrengapparaat voor makkelijker inbrengen van Quick-set infuusset. Aan de bovenkant een opstaande rand voor plaatsen infuusset. Inkeping aan onderzijde voor verwijderen schutfolie. Vingerafdrukgroeven rond inbrengknoppen.

### Productinformatie


MiniMed Quick-Serter inbrengapparaat; voor het makkelijker inbrengen van een Quick-set infuusset.

Het inbrengapparaat wordt gebruikt om het Quick-set infuusset makkelijker in te brengen. Het inbrengapparaat is aan de bovenkant voorzien van een opstaande rand. Hierdoor kan het inbrengapparaat onderste boven op de tafel gezet worden, zonder dat de ontgrendelingsknop ingedrukt wordt. Door het inbrengapparaat onderste boven op de tafel te zetten kan het infuusset makkelijker aan de onderzijde van het inbrengapparaat geplaatst worden. Aan de onderkant is het inbrengapparaat voorzien van een inkeping, deze pleisterschutfolie inkeping maakt het eenvoudiger de schutfolie van het infuusset vast te nemen en te verwijderen.

Aan beide zijkanten van het inbrengapparaat zitten groene knoppen, die ingedrukt moeten worden om het infuusset in de huid te brengen. Rond de groene knoppen zitten vingerafdrukgroeven. De vingerafdrukgroeven maken het vasthouden en indrukken van de groene knoppen makkelijker. Nadat het infuusset in de huid is ingebracht moet men op de ontgrendelingsknop drukken om het inbrengapparaat te verwijderen. Het brede voetstuk vermindert de kans dat de pleister aan de zijkant blijft vastplakken.

Specificatie:

inbrengapparaat voor Quick-set infuusset  
opstaande rand  
pleisterschutfolie inkeping  
vingerafdrukgroeven rond inbrengknoppen  
breed voetstuk

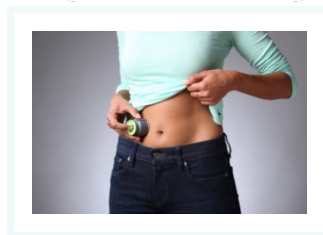

## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                   | Binnendoos | Overdoos  | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 3039669   | MINIMED QUICK-SERTER MMT-305QS | 1 st.      | 1 x 1 st. | 16297032  |         |